

スネアワイヤ

品 番	スネア形状	スネア幅 (mm)	JAN コード
BSWA-210	標準型	26	4545367076054
BSWAS-210	標準型 (ソフトタイプ)		4545367076061
BSWH-210	六角型		4545367076078
BSWHS-210	六角型 (ソフトタイプ)		4545367076085
BSWN-210	先端針付型 (針長 2.5mm)		4545367076092
BSWFT-210	オーバル小型	15	4545367076108

■ 販 売 名 : ゼメックス バイポーラスネア S
■ 承認番号 : 20700BZZ00425000

スネアシース

品 番	適合鉗子口径 (mm)	シース長 (mm)	JAN コード
BSSA-2107	2.8	2,100	4545367001438

■ 販 売 名 : ゼメックス バイポーラシース B-Wave
■ 承認番号 : 21100BZZ00185000

スネアハンドル

品 番	仕 様	JAN コード
BSHA-01	スネアハンドル	4545367001261

■ 販 売 名 : ゼメックス バイポーラシース B-Wave
■ 承認番号 : 21100BZZ00185000

バイポーラスネア用延長コード

品 番	仕 様	JAN コード
PSEC14	オリンパス PSD-30、PSD-60、ESG-100 用	4545367050726
PSEC46	エルベ / バリールラブ、オリンパス UES-30 用	4545367050740

■ 販 売 名 : ゼメックス バイポーラシース B-Wave
■ 承認番号 : 21100BZZ00185000

注 意

- 本カタログに記載しました製品の仕様・外装につきましては、事前の予告なしに変更する場合があります。
- 本品のご使用に際しては、添付文書を必ずお読みください。

製造販売元

ゼオンメディカル株式会社


〔本 社〕〒100-0005 東京都千代田区丸の内 1-6-2
TEL.03-3216-0930 FAX.03-3216-1270
URL : zeonmedical.co.jp

XEMEX は日本ゼオン㈱の登録商標です。

Jun.2023
EX-301 0623010(WV05)

ゼメックスバイポーラスネア B-Wave[®]

バイポーラ高周波電気手術用処置器具

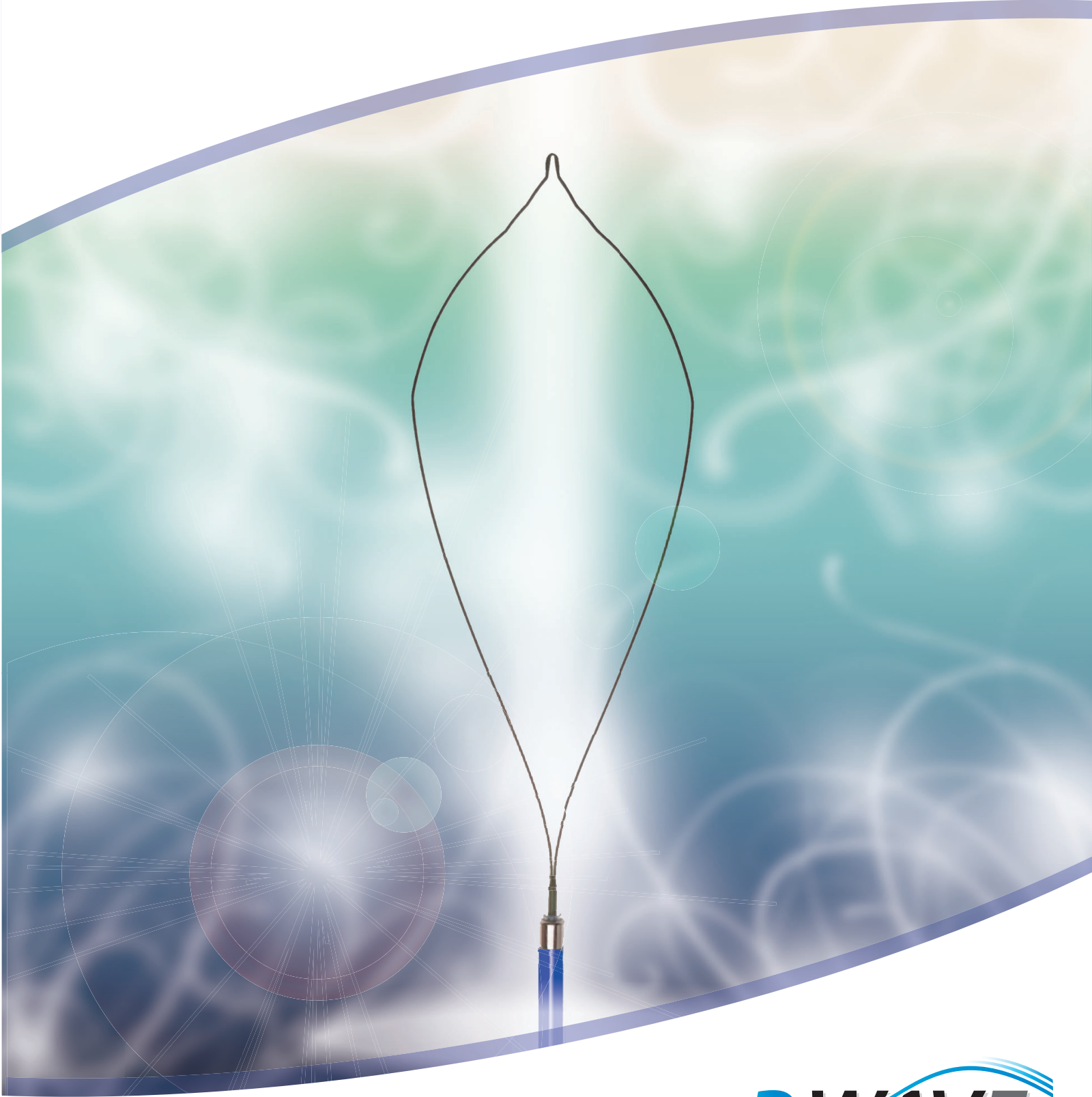

設計思想にこだわった新しい機構のバイポーラスネア！

ワイヤ電極を従来の二極構造から一極構造にしました。

従来型に採用されていた絶縁用先端セラミックチップをなくし、一本のワイヤ構造にしました。このことにより従来型で希に見られた組織の巻き込みによる「切れ残り」現象をなくし、「切れ残り」に起因する出血が軽減されます。

対極をシース先端に設けた新機構を採用しました。



B-Wave® の電気の流れは、ワイヤ（組織切除面）からシース電極に向けて通電されます。このため、「片切れ」現象がなくなり、均一できれいな焼灼が得られます。

この機構では、両電極の「面積差」を利用した原理を応用し、ワイヤ電極にゼオンメディカル独自のコーティング技術を加えることにより、組織切断に必要なジュール熱の発生をワイヤの電極のみに集中させることに成功。


シース内に設けられたチューブによる絶縁構造。

B-Wave® では二つの電極がシース内のインナーチューブで絶縁されています。

この構造により、両電極の絶縁がワイヤ形状に左右されることなく行われます。

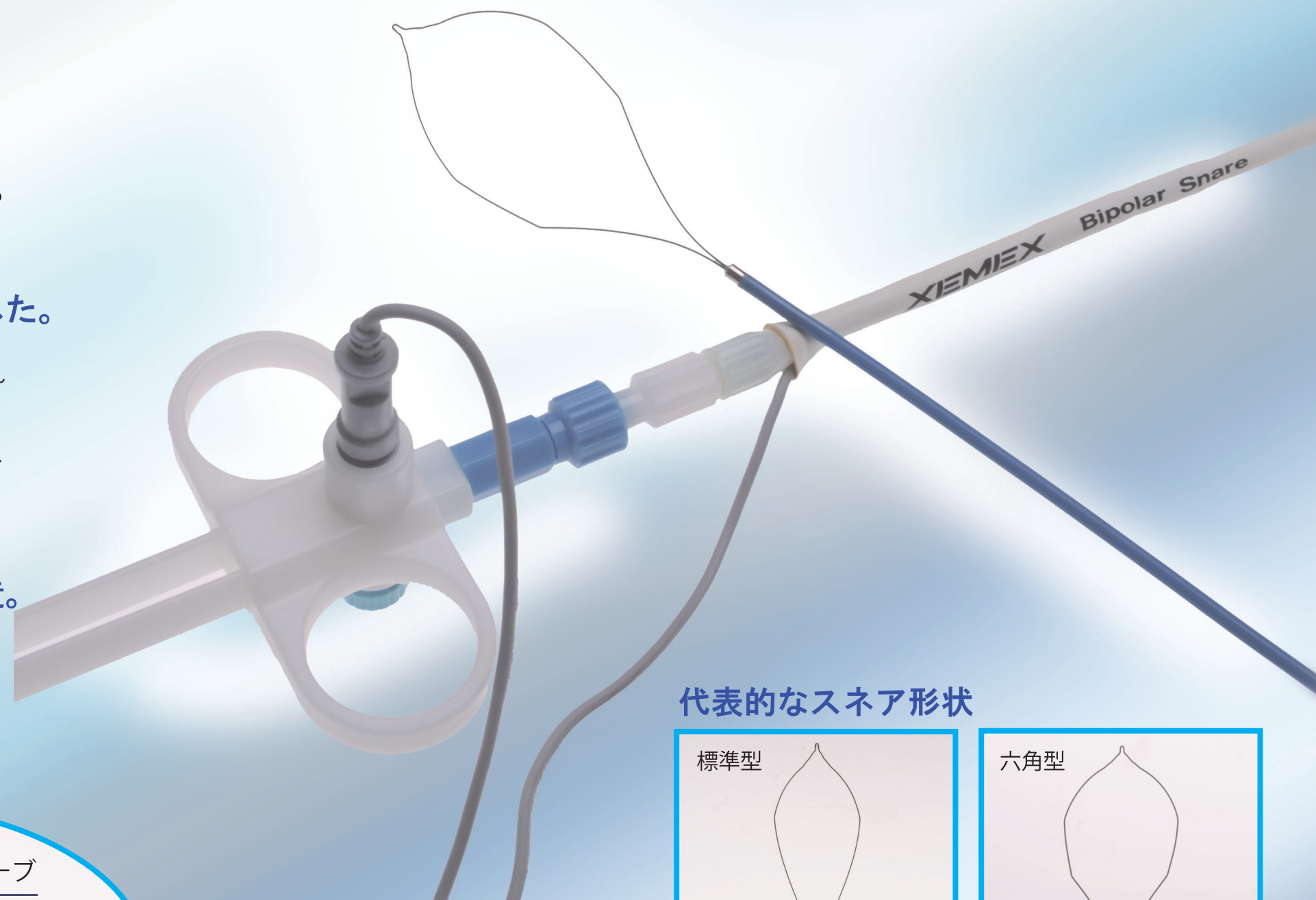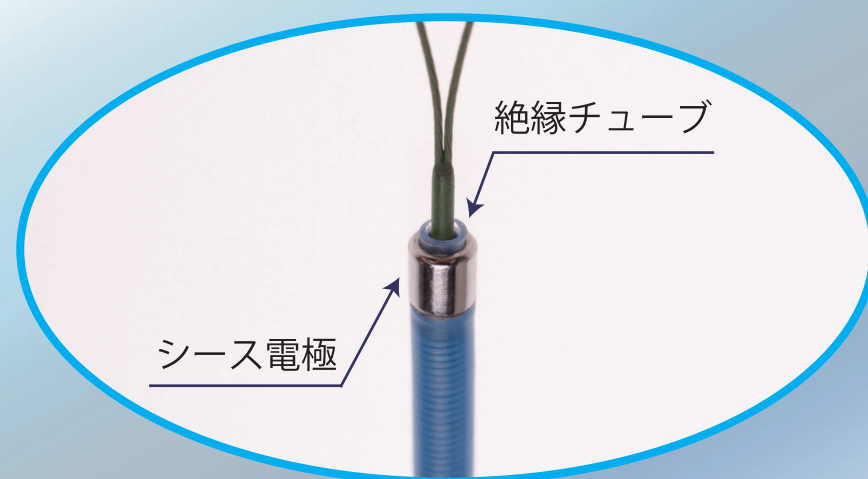

代表的なスネア形状

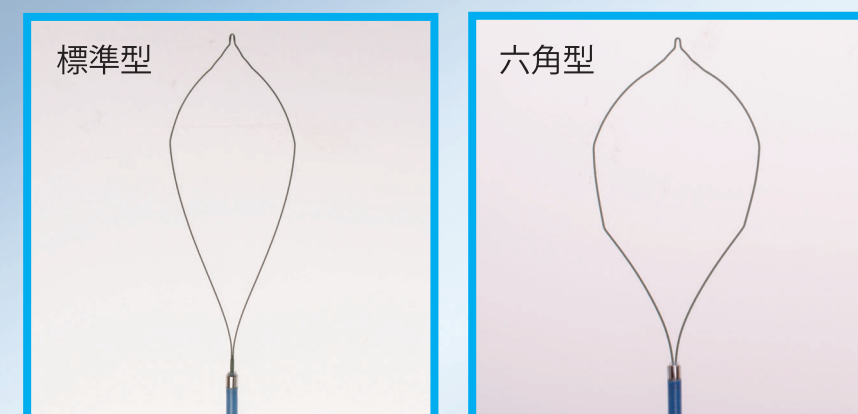

組み立て式のバイポーラシステム

シース電極を採用することでワイヤが一本構造となり、組み立て、分解が可能となりました。これによりワイヤ（単回使用）の交換が容易にでき、またシースは洗浄することで再使用も可能となり、経済的です。