


ゼメックス バスケットカテーテル NT

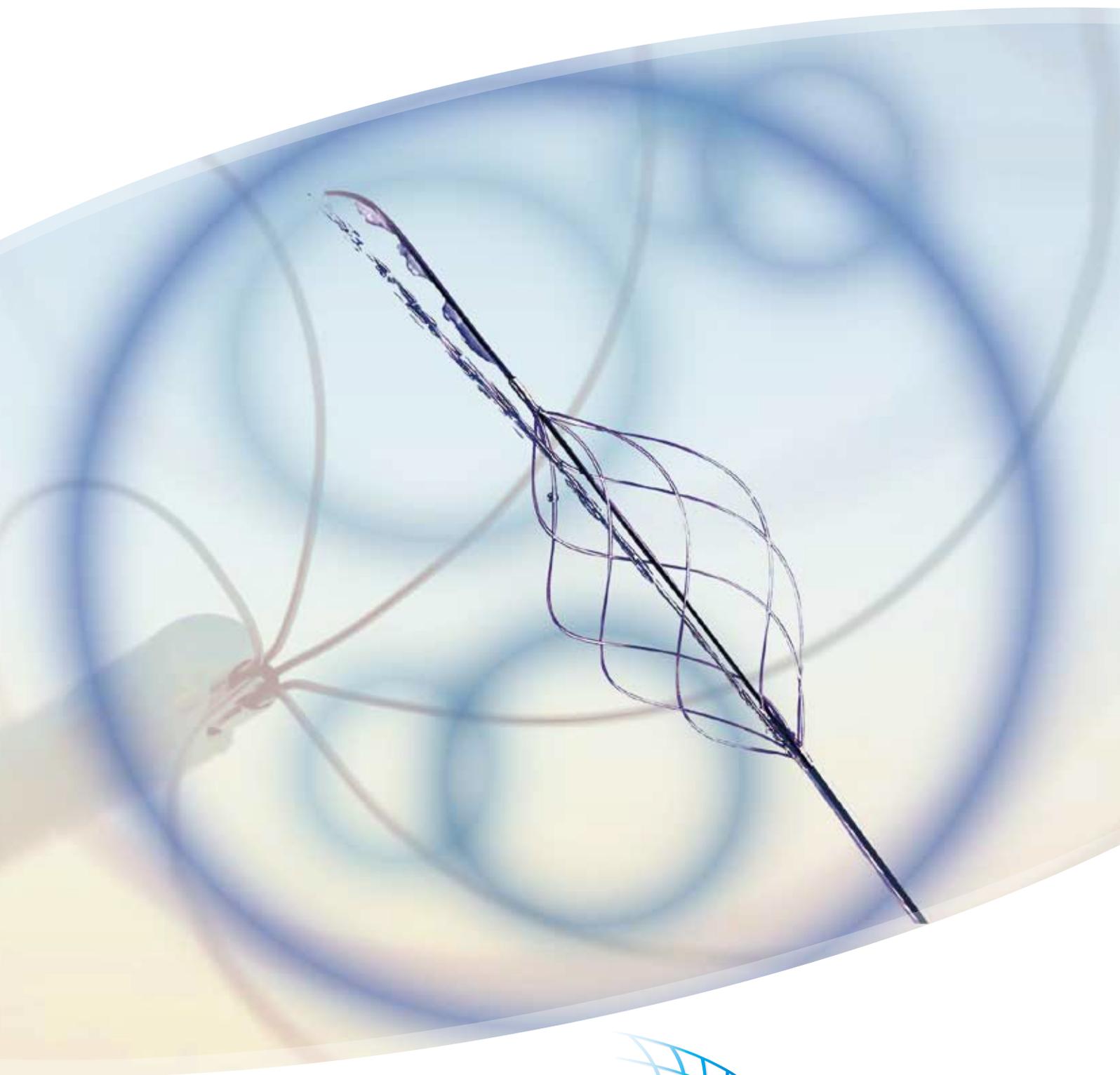

basket catheter NT
for endoscopic biliary lithotripsy

トリプルルーメンタイプ


結石把持性能向上へのチャレンジ

- バスケットの材質には Ni-Ti を使用。バスケットの形状保持性により胆管内の彎曲部等にも柔軟に対応できます。
- 対象部位や結石の大きさに応じて、大小 2 つのバスケットサイズを選択する事が可能です。
- ドルミア型のバスケットは小結石をバスケット内へ取り込みやすく、また取り込んだ結石を逃がしにくい形状になっています。
- トルク伝達性に優れたワイヤを採用することで、手元の回転操作により、一対一の割合でバスケットを回転可能。この操作は結石を把持する際に補助的な効果を発揮します。



操作性向上へのチャレンジ

- カテーテル先端形状はバスケットをカテーテル内に引き込む際の引っ掛かりを軽減し、かつ胆管内への挿入性向上に寄与します。
- すべてのタイプが 0.035 インチガイドワイヤ対応ですので、手技中にカテーテル交換が必要な場合でもガイドワイヤ交換は必要ありません。
- バスケットルーメン、ガイドワイヤルーメン、造影剤注入ルーメンが独立した 3 ルーメン構造です。ガイドワイヤを挿入した状態で造影剤を注入できます。また広い内腔のため、小さな力で注入可能です。

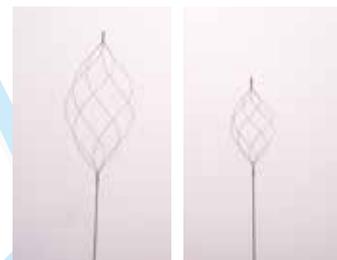

トリプルルーメンタイプ

品番	バスケット形状	バスケットサイズ (mm)	カテーテル全長 (cm)	カテーテル外径 (mm)	適合鉗子口径 (mm)	適合ガイドワイヤ (mm)	JAN コード
NBWS8620S	ドルミア型 6 線小型	40×20	200	2.6	2.8 以上	0.89 (0.035inch)	4545367030223
NBWS8620L	ドルミア型 6 線大型	60×30	200	2.6	2.8 以上	0.89 (0.035inch)	4545367030230

■販売名： ゼメックスバスケットカテーテル NT
■認証番号： 21500BZZ00057000

特定保険医療材料分野名及び機能区分：「胆道結石除去用カテーテルセット (3) 採石用バスケットカテーテル」


シングルルーメンタイプ

異径チューブの採用

- 手元部外径φ2.6mm、先端部(30cm)外径φ1.9mmの異径チューブを採用することで、プッシュナビリティ、耐キック性の向上を図りました。しかもダイレクト挿入が容易です。
- 造影剤の注入抵抗圧が小さいため、造影剤の注入が容易です。また、術中、造影剤の吸引も可能です。

独自設計のバスケット先端チップの採用

- バスケットを収納した状態でも造影剤の注入が可能です。
- ハンドルスライダーを引くとバスケットはチューブ内に引き込まれます。バスケットスライダーを過剰に引いても、バスケット先端チップでチューブ先端を变形させる可能性が低減されています。

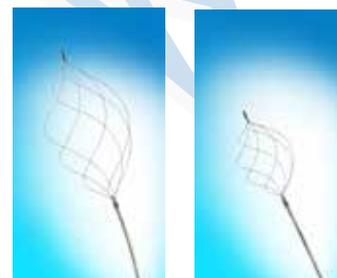

シングルルーメンタイプ

品番	バスケット形状	バスケットサイズ (mm)	カテーテル全長 (cm)	カテーテル外径 (mm)		適合鉗子口径 (mm)	JAN コード
				先端部	手元部		
NBS8620S	ドルミア型 6 線小型	40×20	200	1.9	2.6	2.8 以上	4545367034726
NBS8620L	ドルミア型 6 線大型	60×30	200	1.9	2.6	2.8 以上	4545367034733

■販売名： ゼメックスバスケットカテーテル NT
■認証番号： 21500BZZ00057000

特定保険医療材料分野名及び機能区分：「胆道結石除去用カテーテルセット (3) 採石用バスケットカテーテル」

注意

- 本カタログに記載しました製品の仕様・外装につきましては、事前の予告なしに変更する場合があります。
- 本品のご使用に際しては、添付されている添付文書を必ずお読みください。

製造販売元

WEMEX は日本ゼオン(株)の登録商標です。

ゼオンメディカル株式会社

(本 社) 〒100-0005 東京都千代田区丸の内 1-6-2
TEL.03-3216-0930 FAX.03-3216-1270
URL : <http://www.zeonmedical.co.jp>

Aug. 2017
EX-415 0817010(WV06)