

ゼメックス クラッシャーカテーテル

XEMEX LITHOTRIPSY BASKET CATHETER

●標準セット

品番	システム	適合鉗子口径 (mm/F)	バスケット		有効長 (mm)	JANコード
			形状	サイズ(mm)		
LBGT-7420S	オーバーザワイヤ	2.8/7	タイコ型4線	60×30	2000	4545367009069
LBGTS-7420S	オーバーザワイヤ	2.8/7	タイコドルミア型4線	60×30	2000	4545367030247
LBGT-7410S	オーバーザワイヤ	2.8/7	タイコ型4線	60×30	1000	4545367009038
LBGT-7320S	オーバーザワイヤ	2.8/7	タイコ型3線	70×30	2000	4545367009014
LBGTS-7320S	オーバーザワイヤ	2.8/7	タイコドルミア型3線	70×30	2000	4545367030254
LBGT-7420S	ポールチップ	2.8/7	タイコ型4線	60×30	2000	4545367008932
LBGT-7425S	オーバーザワイヤ	2.8/7	タイコ型4線	60×30	2500	4545367043735
LBGT-7620S	オーバーザワイヤ	2.8/7	タイコ型6線	60×30	2000	4545367058791

- 販売名:ゼメックス クラッシャーカテーテル
- 特定保険医療材料請求分類:「胆道結石除去用カテーテルセット (4) 碎石用バスケットカテーテル ① 全ディスプレイ型
- 認証番号:21000BZZ00688000

●クラッシャーハンドル

品番	JANコード
LBHDL	4545367009083

- 認証番号:21000BZZ00688000

●エンドトリプター

品番	内容	シース外径 (F)	シース長 (mm)	JANコード
LBETH	エンドトリプターハンドル (未滅菌)	-	-	4545367015718
LBETS	エンドトリプターシース (未滅菌)	12	1000	4545367015725

- 販売名:エンドトリプター
- 届出番号:13B1X00111000007

注意

- 本品は、医師または医師の監督下の医療従事者において使用されるものであり、内視鏡の臨床手技については使用者側で十分な研修を受けてご使用下さい。
- 本品の使用に際しては、添付されている添付文書を必ずお読み下さい。
- 本品の仕様・外装については事前の予告なしに変更する場合があります。

製造販売元

XEMEX は日本ゼオン株の登録商標です。

ゼオンメディカル株式会社

(本 社) 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2
TEL.03-3216-0930 FAX.03-3216-1270
URL: http://www.zeonmedical.co.jp

Xemex Lithotripsy Basket Catheter

crusher  catheter
for endoscopic biliary lithotripsy

確実なカニューレションをアシストするオーバーザワイヤ方式を採用しました。
胆道への容易なアプローチは手技全体の成否を握っていると言っても過言ではありません。
ゼメックス クラッシャーカテーテルは バスケットワイヤがシースから抜去できるため、造影時に使用したガイドワイヤを胆管内に残したまま、カテーテル交換の要領でクラッシャーカテーテルを胆管内にカニューレションすることができます。
このため、胆道へのアプローチが困難な症例にも対応できます。

独自設計のコイルシース採用により操作性・砕石性が向上

クラッシャーカテーテルは、先端がフレキシブルな独自設計のコイルシースを採用しているため、カニューレションが容易です。また、この特殊シースは軸方向の力に対して強度が優れているため、砕石能に優れています。

軽量で強度に優れたクラッシャーハンドル

クラッシャーハンドルは軽量でかつ強度に優れた設計となっています。このため、操作性に優れ、砕石能を効果的に引き出します。また術者の手になじむサイズ・デザインになっており、“ease-of-use”を追求しました。



補足性能を向上させた6線タイプをラインナップ

6線化により、採石バスケット並みに小中結石の捕捉性能を持ったクラッシャーカテーテルです。従来タイプに比べて、一度でより細かい砕石が可能となります。

ダブルバルーン対応の有効長2500mmタイプ

シース有効長を2500mmとすることにより、ダブルバルーンなど長い内視鏡にも対応が可能となります。

経皮タイプを品揃え

有効長が1000mmで、取り回しが容易です。無菌的操作に適しています。

関連製品 エンドトリプター

クラッシャーカテーテル使用中、バスケット嵌頓に陥った場合、またクラッシャーカテーテル本体が破損した場合に使用できます。



タイコ型4線

タイコドルミア型4線

ドルミア型4線

タイコ型4線 (ボールチップ)

タイコ型3線

タイコドルミア型3線

ドルミア型3線

タイコ型6線