

仕 様

品 番	先端形状	ナイフ長	ナイフ外径	有効長	適合鉗子口径
BSJB15B	ボールチップ	1.5mm	0.35ømm	1950mm	2.8mm以上
BSJB20B		2.0mm			

注 意

- 本品は、医師または医師の監督下の医療従事者において使用されるものであり、内視鏡の臨床手技については使用者の側で十分な研修を受けてご使用下さい。
- 本品のご使用に際しては、添付文書を必ずお読み下さい。
- 本品の仕様・外装については事前の予告なしに変更する場合があります。


■ 販売名:バイポーラ高周波ナイフ
■ 認証番号:223ABBZX00108000



BSJB15B



BSJB20B

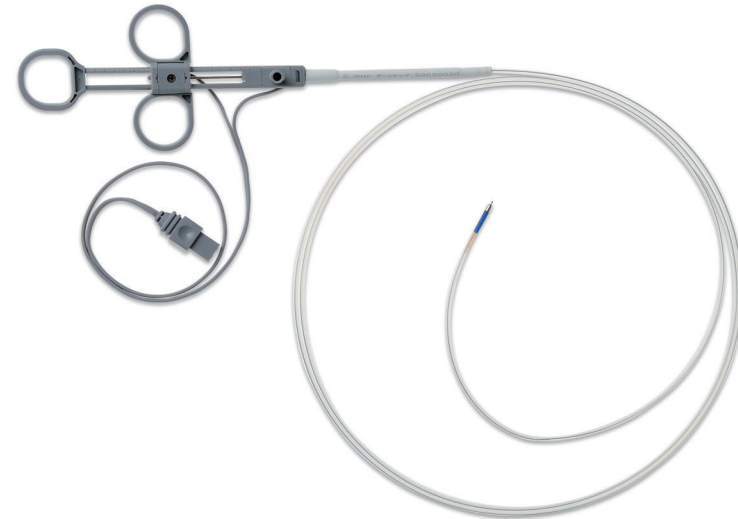

延長コード

品 番	仕 様
PSEC14	オリンパス社 ESG-100 用
PSEC46	エルベ社 VIO-300D、ICC-200 用

注 意

- 本品は、医師または医師の監督下の医療従事者において使用されるものであり、内視鏡の臨床手技については使用者の側で十分な研修を受けてご使用下さい。
- 本品のご使用に際しては、添付文書を必ずお読み下さい。
- 本品の仕様・外装については事前の予告なしに変更する場合があります。

■ 販売名:ゼメックス バイポーラシース B-Wave
■ 承認番号: 21100BZZ00185000

製造販売元


ゼオンメディカル株式会社

〔本 社〕〒100-0005 東京都千代田区丸の内 1-6-2
TEL.03-3216-0930 FAX.03-3216-1270
URL: zeonmedical.co.jp

XEMEX は日本ゼオン㈱の登録商標です。

Jet B-knife®

バイポーラ高周波ナイフ ジェットビーナイフ

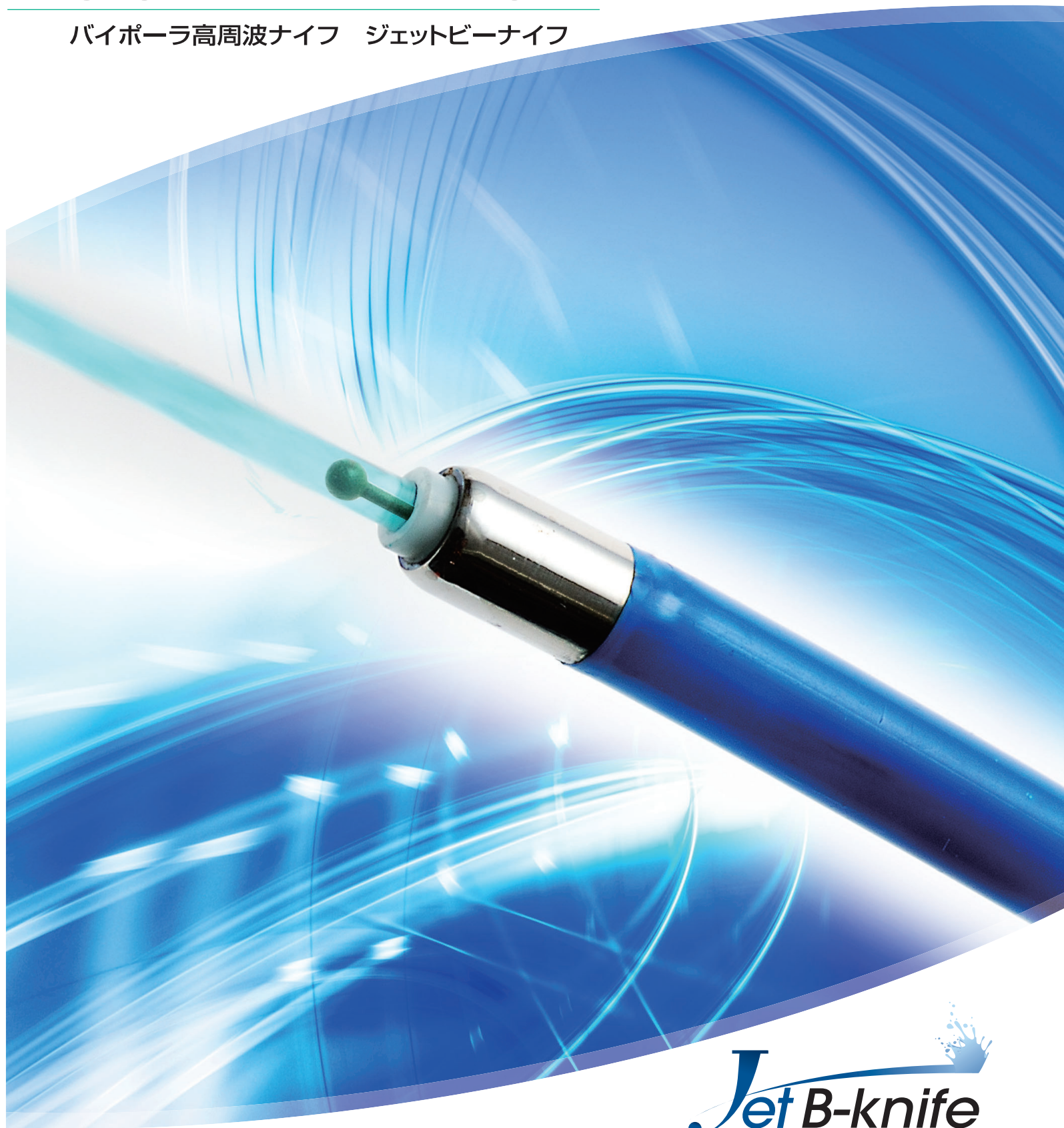

手技時間の短縮をめざして進化した バイポーラ針状ナイフ

針出長を固定化することで手技時間の短縮をめざしました。

注水機能によって病変部のクリアな視界を確保し、切開性能の持続を図りました。

特長1


病変部周辺組織への熱損傷を低減したESDの処置をサポートするため、長年にわたりバイポーラスネアで培った構造を採用。切れ味の向上と消化管穿孔回避の両立をめざしました。

特長2


先端の針を1.5mmと2.0mmの長さで固定することで先端長の調整が不要となり、手技に集中できることによる処置時間の短縮を図りました。

特長3

注水機能を採用することにより、病変部のクリアな視界を確保できます。また針先への組織片付着などを洗浄することにより、切開性能の持続が図れます。

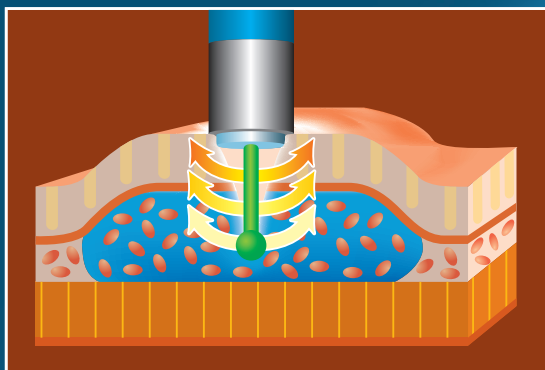

イメージ図

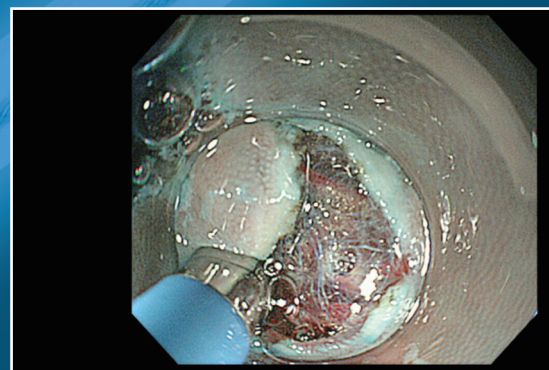

内視鏡画像

