

2023年11月

お客様各位「ゼメックス止血システム とめ太くん®」使用上の注意事項

拝啓、時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素より弊社製品に格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度「ゼメックス止血システム とめ太くん® 加圧器」の使用方法につきまして、下記の通りご案内申し上げます。

当該加圧器は、添付文書では「【禁忌・禁止】使用方法2.加圧器の最大目盛(300 mm Hg)以上に加圧しないこと。」及び「【使用上の注意】1.重要な基本的注意1)とめ太くんの止血バッグを加圧した直後は、設定圧で目盛が安定するまで数回加圧を繰り返し、目盛が設定圧で安定するのを確認すること。」と記載させていただいており、加圧状態を圧力計で確認しながら加圧を調整していただく使用方法となっております。従いまして、圧力計の指針を1周以上させてご使用になる状態は想定しておりません。大変申し訳ございませんが、加圧器で加圧を行う場合には、加圧状態を圧力計で確認しながら、過加圧にならないように調整いただくようお願い申し上げます。

敬具

— 記 —

■販売名 : ゼメックス止血システム とめ太くん®

■承認番号 : 13B1X00111000001

■対象品番 :

品番	品名	JANコード
STK100	加圧器	4547319360082

以上

お問い合わせ先：ゼオンメディカル株式会社

循環器事業統括部 マーケティンググループ

〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2

TEL : 03-3216-1268 FAX : 03-3216-1269

XEMEX は日本ゼオン(株)の登録商標です。